

oblast	kdy?	četnost	jak?	způsob	čím? produkt	konc.	expoze	spektrum
mytí rukou hygienická dezinfekce rukou chirurgická dezinfekce rukou regenerace		pacienti i personál několikrát denně, vždy po použití WC, po znečištění po kontaktu s kontaminovaným materiálem, po a před ošetrovatelskými úkony	rozetřít s trochou vody, opláchnout osušit ručníkem na jedno použití	vetřít do suchých, prázdných rukou a nechat oschnout, neutírat	ESEMTAN WASCHLOTION	konc.	30 sekund	
					DESDERMAN pure roztok nebo gel	konc.	30 sekund	ABTMV, MRSA
					SENSIVA	konc.	30 sekund	A(B)TMV, MRSA
					DESDERMAN N roztok nebo gel	konc.	1,5 min.	ABTMV, MRSA
	před invazivním zákrokem		vetřít do suchých rukou a předloktí po umytí šetrnou mycí emulzí		SENSIVA	konc.	2 x 1,5 min.	A(B)TMV
	dle potřeby několikrát denně		vetřít do suchých rukou a nechat vsřebat		ESEMTAN HAUTBALSAM	neředěný		
kůže sliznice a rány	před vpichy, odběry nebo jinými zákroky		oblast smočít postříkem nebo tamponem		KODAN FORTE bezbarvý	konc.	15 sekund	A(B)TMV, MRSA
					OCTENISEPT	neředěný	60 sekund	A(B)MV, MRSA
nástroje a pomůcky z kovů, skla keramiky, pryže plastů manuální postup digestivní endoskopy nástroje a pomůcky - čištění	po použití vložit do připraveného dezinfekčního (kombinovaného) roztoku		celé ponořit, dodržet expoziční dobu, příp. dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit a invazivní nástroje dát sterilizovat	pro digestivní endoskopy platí dvoustupňová dezinfekce a oplach čistou vodou pro ostatní termolabilní flexibilní endoskopy platí vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou	GIGASEPT INSTRU AF v ultrazvukové lázni	3%/4% 3%	15 min./30 min. 5 min.	A(B)TMV, MRSA
					GIGASEPT AF forte první stupeň dezinfekce a dezinfekční mytí flexibilní digest. endoskopy	2%/5%	15 min./5 min. 0,75%/10 min.	A(B)TMV, MRSA A(B)MV, MRSA
					GIGASEPT FF druhý stupeň vyšší stupeň - endoskopy	4% 5%/3% 8% 8%	15 min. 15 min./60 min. 60 min. 16 hod.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA
					LYSETOL V první stupeň a mytí v jednom druhý stupeň vyšší stupeň Gigasept PAA druhý i vyšší stupeň dez.	1% 5% 10% konc.	10 min./15 min. 15 min. - 7 dní 15 min. - 7 dní 5 min.	A(B)MV, MRSA ABCTMV, MRSA ABCTMV, MRSA
	po dezinfekci s virucidním účinkem		celé ponořit a dočistit, opláchnout		GIGAZYME také v ultrazvukové lázni	0,5 - 1%	6 - 10 min.	
plochy, povrchy a předměty	sálavý komplex 2x denně, hl. úklid průběžně mezi operacemi		vyšetřovny: 2x denně lůžkové pokoje: 2x denně pracovny lékařů a sester: 2x denně chodby, jídelna: 1x denně WC, koupelny: 2x denně čistící místnost: 2x denně	mytí s dezinfekčním účinkem vlhkým způsobem a nechat zaschnout	TERRALIN (protect)	2%/0,5%	15 min./60 min.	ABTMV, MRSA
					PERFORM	1%/0,5% 3%/2% 1%	30 min./60 min. 30 min./60 min. 2 hod.	ABMV, MRSA ABTMV, MRSA ABCTMV, MRSA
malé plochy a povrchy rychlá dezinfekce rychlá dezinfekce van	po kontaminaci		postříkem nebo otřením		MIKROZID liq. MIKROZID AF ubrous. Mikrozid sensitive ubr. MIKROZID sensitive liq	konc.	1 min. 5 min. 1 min.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA A(B)TMV, MRSA ABTMV, MRSA
					po použití	vytřít nasátou houbou a po expozici opláchnout	TERRALIN PROTECT	konc.
flexibilní endoskopy v mycích automatech	po použití a manuálním předčištěním		chemotermicky - aldehydová	chemotermicky - bez aldehydů	THERMOSEPT ER THERMOSEPT ED	0,5% 1%	5 min. 5 min.	enzymat. čištění ABTMV
					THERMOSEPT ER THERMOSEPT AF	0,5% 1%	5 min. 5 min.	enzymat. čištění ABTMV
aseptická příprava dutiny ústní před výkonem					OCTENIDOL sol.	koncentrát	1 min.	A(B)V, MRSA
prádlo a odpady					smluvně s autorizovanou firmou			

Vysvětlivky: A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, (B) - omezeně virucidní účinek (účinnost na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV potvrzena v zahraničních laboratořích), B - virucidní účinek na široké spektrum virů (vč. malých neobalených virů), C - sporicidní účinek, T - usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis, M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií, V - fungicidní účinek (plísň)

odpovídá vyhlášce 195/2005 Sb.

Zdravotnické zařízení:

Výrobce: Schuelke&Mayr, Norderstedt, SRN

Distributor pro ČR: Nora, a.s., Praha 7
Jankovcova 2 (TOKOVO)

tel: 266 78 2929, objednávky@nora-as.cz
bezpečnostní listy a produktové informace na:
www.nora-as.cz