

Čištění a dezinfekce nástrojů



Gigasept AF

Mytí, dezinfekční mytí a dezinfekce endoskopů, anestetického příslušenství, chirurgických nástrojů, laboratorních přístrojů a pomůcek.

- bezaldehydový tekutý koncentrát
- svěží vůně
- vhodný do ultrazvukových lázní (4%-5 min.)
- široké spektrum účinku (ABTMV)
- výborné čistící schopnosti
- dezinfekční čištění flex.endoskopů (1,5% roztok)
- dezinfekce digestivních endoskopů (4% - 15 min.)
- mikrobiologicky účinný 7 dní (pod sérovou zátěží)
- balení: 2l láhev a 5l kanistr

aplikační pomůcky



klíč
ke kanystru



dávkovač
na 2l láhve
(20 ml jedno
překlopení)



vanový systém: 3l, 5l, 10l, 30l

Gigasept instru AF

Čištění a dezinfekce termostabilních a termolabilních nástrojů všech druhů (s výjimkou flexibilních endoskopů). Předsterilizační příprava v nemocnicích a lékařských praxích.

- bezaldehydový tekutý koncentrát
- svěží vůně a mikrobiálně účinný 7 dní (pod sérovou zátěží)
- vhodný do ultrazvukových lázní (3% - 5 min.)
- široké spektrum účinku (ABTMV)
- excelentní čistící vlastnosti
- pracovní koncentrace: 1,5% - 60 min., 2% - 30 min., 3% - 15 min
- výborná materiálová kompatibilita (kovy, guma, sklo, plasty)
- pracovní roztoky jsou plně biodegradabilní
- balení: 2l láhev a 5l kanistr

Reinigungsverstärker für Gigasept FF

Mytí termostabilního i termolabilního instrumentária včetně endoskopů

- tekutý alkalický koncentrát s mimořádnými čistícími schopnostmi a se speciálním agensem pro hliník(Al)
- vhodný i do myček s cirkulací studené vody
- neobsahuje fosfáty ani tenzidy
- pracovní koncentrace: 1% roztok, použitelný 1 den
- lze přidat do pracovního roztoku Gigasept FF (dezinfekce i čištění v jedné etapě)
- balení: 2l láhev

Gigasept FF

Dezinfekce a vyšší stupeň dezinfekce flexibilních endoskopů, ultrazvukových dond, příslušenství pro anestezii a termicky citlivých nástrojů.

- tekutý koncentrát přírodního aldehydu, nízkotoxický, za běžných podmínek plně biologicky odbouratelný
- plně aktivní 16 dní bez nutnosti kontroly (samoregenerační schopnost)
- 3% roztok alternuje Gali-Vali (uchovávání podávek)
- dokonalý oplach z nástrojů (žádná intolerance sliznic)
- vynikající materiálová kompatibilita (doporučení výrobců Olympus, Toshiba, Fujinon, Storz, Pentax,...)
- plné spektrum účinku (ABCTMV)
- prac.koncentrace: 3% - 60 min., 6% - 15 min., vyšší stupeň dezinfekce: 10% - 5h a 5% - 12h
- vhodný i do poloautomatů s cirkulací studené vody
- balení: 2l láhev

Gigazyme

Čištění chirurgického instrumentária a flexibilních endoskopů

- tekutý enzymatický nepěnivý koncentrát, pH neutrální
- čistí bez reziduí, příjemně voní, je plně biologicky odbouratelný
- vhodný pro manuální i poloautomatické čištění i do ultrazvukových lázní
- ředitelný pitnou vodou, dokonale se oplachuje z povrchů
- kompatibilní se všemi dezinfekčními přípravky
- pracovní koncentrace: 0,5 - 1% dle tvrdosti vody. U silně znečištěných nástrojů lze koncentraci zvyšovat až do 10%.
- ideální teplota vody je do 32°C. Vyšší teplota vody způsobuje mléčné zakalení - návrat k čirosti zajistí přidání studené vody.
- balení: 2l láhev

Lysetol V

Dezinfekce a čištění chirurgického instrumentária, flexibilních a rigidních endoskopů, anestetického příslušenství apod.

- tekutý koncentrát na bázi aldehydů s plným spektrem účinku (ABCTMV) v krátkém čase : 10% - 15 min.
- plně aktivní 7 dní, příjemná vůně
- velmi dobrá materiálová kompatibilita
- vhodný do ultrazvukových lázní: 4% - 5 min.
- dvoustupňová dezinfekce(ABTMV): 5% - 15 min.
- vyšší stupeň dezinfekce(ABCTMV): 10% - 15 min.
- balení: 2l láhev

S&M Labor

Čištění nástrojů a jiných pomůcek ve zdravotnictví (laboratorní sklo, injekční stříkačky, kanyly, kleště, nůžky, pinzety, gumové rukavice a zástěry, inhlační přístroje, porcelán, chirurgické a stomatologické nástroje, OP-stoly, vyšetřovací křesla, regály, skříňe, dlaždice...

- granulovaný alkalický detergent rozpustný ve studené, vlažné i horké vodě, použitelný v lázních i vlhkým otěrem
- pracovní roztoky:(0,5 - 1%) -(6-10min.) dle stupně znečištění
- balení: plastová dóza 800g

autorizovaný distributor pro ČR: **Nora** a.s.

Jankovcova 2(TOKOVO)
170 00 Praha 7

Tel: 266 78 29 29, fax: 266 78 29 92

www.nora-as.cz

