

Praktický způsob dezi nfeke kůže, rukou a malých ploch.



dříve
Sagrosept® Tücher

Kodan Tücher

dezinfekční ubrousky

**Přímé použití
vytažením
z dózy**



Profil

- **mikrobiologická účinnost:**
proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, mikroskopickým houbám a virům: Hepatitis B, HIV, rotaviry
- Baleno v dóze po jednotlivých kusech
- Neškodí pokožce
- DGHM - certifikováno

Typ

Dezinfekční ubrousky pro čištění/ dezinfekci předmětů, kůže a hygienickou dezinfekci rukou

Oblasti použití

- Dezinfekce a čištění pokožky před vyšetřeními
- Čištění a dezinfekce všech typů pomůcek, např. držáků operačních osvětlení, opěrek hlavy, teploměrů, vypínačů, kontaktních míst, citlivého diagnostického zařízení, záchranných vaků, lékařských brašen apod. Ideální pro terénní praxi, pohotovostní ambulance, záchrannou službu atd.

Kodan ubrousky nepoužíváme na materiály citlivé na alkohol (např. akrylové sklo a lakované povrchy)

Charakteristika

Složení

1 vlhký ubrousek obsahuje
0,7629 g 2-propanol, 0,7629 g 1-propanol,
0,0254 g kys. mléčné, 0,0127 g kyseliny benzoové, ce-
lulózovou tkaninu, aroma a čištěnou vodu

balení, 90 ubrousků obsahuje
254 ml aktivního roztoku

Chemicko-fyzikální údaje

(platí pro koncentrát)

pH-hodnota 5,5
teplotně stabilní od - 5 °C do + 30° C
bod vznícení 25 °C + 1 °C

Balení

karton

Dóza o obsahu 90 ks obrousků 10 Dóz
náhradní balení (sáček 90 ks)

Použití

Kodan® ubrousky jsou po vytažení z dozy ihned použitelné. Kůže, ruce, předměty se otírají a látka se nechá působit (kůže 30 s, předměty 5 min.). Jedním ubrouskem je možné dezinfikovat až 50 cm² kůže nebo 100 cm² hladké plochy.

Oblasti použití	Expoziční časy (testováno pro aktivní substanci)
DGHM-Certificate Hygienická dezinfekce rukou	30 sek.
DGHM-Certificate Plošná dezinfekce	5 min.
Hepatitis B	5 min.
HIV	1 min.
rotaviry	1 min.
Helicobacter pylori	1 min.


Návod pro vytažení ze zásobníku: Otevřete vrchní víčko, vytáhněte ubrousek a diagonálním tahem jej oddělte od následujícího růžku, který se objeví ve zvýšeném hrdle.



Dózu pevně uzavřete. Zabráníte tím vysychání obsahu.



V případě, že se další ubrousek neobjeví, sejměte vrchní část dózy a prostrčte ubrousek hrdlem. Tím se obnoví ře-
tězové kusové vytahování.

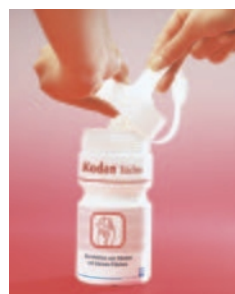

Bezpečnostní pokyny

Neaplikujte do očí a na otevřené rány. Hořlavina. Nevhazujte do ohně – výbušné. Skladujte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Použité ubrousky, nejsou-li kontaminovány krví, lze odhazovat do běžného odpadu.

