

schülke -†



kyblík s ubrousky 30 x 30 cm - 40 ks
k napuštění dezinfekčními přípravky

vhodné produkty k napuštění:

Mikrocid AF liq.- koncentrát, 1 min., Mikrocid sensitive - koncentrát, 1 min., Terralin protect - 0,5%-60 min., 1%/30 min., 2%/15 min. Antifect extra - 0,75%/5 min., SM dezinfekční čistič - 3%/30 min.

schuelke wipes mini

Naše plusy:

- široké použití
- jednoduchá manipulace
- použitelné po napuštění 28 dní
- velikost ubrousků (30 x 30 cm)
- 40 ubrousků v jedné roli

oblasti použití

Schülke mini system Wipes napuštěné ubrousky se používají k dezinfekci a čištění ploch a povrchů všech typů zdravotnických prostředků a ploch a povrchů ve zdravotnictví a dalších provozech

použití

Napuštěný ubrousek vytáhnout vrchním otvorem a utrhnout.

Po použití uzávěr opět dobře uzavřít, aby nedocházelo k vysušení zbrusků.

Plochy vlhkým ubrouskem vytřít a nechat působit.

příprava

Navlečte si ochranné rukavice. Vrchní uzávěr kyblíku otevřít a umístit dovnitř roli suchých ubrousků. Připravit si 1,5 litru pracovního roztoku (koncentrát nebo naředěný) a nalít dovnitř. Jedn ubrousek přes vrchní uzávěr povytáhnout a následně uzávěr tlakem uzavřít.

napuštění ubrousků

když jste ubrousky zalili pracovním roztokem počkejte cca 20 minut a můžete začít používat. Používejte pouze přípravky Schuelke.



produkt	balení	kód
dávk.minisystém (Schuelke wipes mini)	1 ks	119530
text.náplň(ubrousky 30 x 30cm)	10x 40 ks	119532

označení zásobníku dle směrnic EU a Vyhl.306/20012 Sb.:
každá role ubrousku obsahuje snímatelnou samolepku pro označení:
Použitý produkt, použitá koncentrace, datum přípravy, datum expirace,
podpis zaměstnance, který obsah připravil



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-0000



Výrobce: Schuelke&Mayr, GmbH, D-22840 Norderstedt, SRN
tel: +49 40 52100-0

Distribuce pro ČR: Nora, as., JAnkovcova 2(TOKOVO), 170 00 Praha 7
tel: +420 266 78 29 29, www.nora-as.cz