



mucadont® IS

virucidní dezinfekce pro nástroje i delikátní senzibilní nástroje vhodná pro manuální ošetření

- Účinný na široké spektrum mikroorganismů
- excelentní materiálová snášenlivost
- doporučeno i výrobcí nástrojů Karl Storz a Richard Wolf
- ideální pro ultrazvukové čištění a dezinfekci

Složení:

100g obsahuje: 4,9g glutaraldehydu, 4,9g formaldehydu + adjuvans. 5 -15% anionických tenzidů, méně než 5% neionogenních tenzidů, parfém.

Vzhled: zelená kapalina o pH 4,5

Značení dle EC směrnice :

- Xn:** zdraví škodlivý
R 20/21/22: zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R37/38: dráždí dýchací orgány a kůži
R40: podezření na karcinogenní účinky
R41: nebezpečí vážného poškození očí
R42/43: může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
S26: při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc
S36/37/39: používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S45: v případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
S51: používat pouze v dobře větratelných prostorách

Mikrobiologická účinnost:

Kontaktní čas	15 min.	30 min.	60 min.
baktericidní	3 %	2 %	1 %
fungicidní	3 %	2 %	1 %
tuberkulocidní		3 %	2 %
omezeně virucidní	1 %		
virucidní		4 %	3 %

Balení: 2l láhev 6 x 2l = karton
 5l kanystř 3 x 5l = karton

Další možné použití:
 podávky - 4% roztok



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
 22840 Norderstedt, Germany
 Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
 Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
 www.schuelke.com
 mail@schuelke.com

autorizovaný distributor pro ČR: **Nora, a.s.**
 Jankovcova 2(TOKOVO), 170 00 Praha 7
 tel: +420 266 78 29 29, fax: +420 266 78 29 92
 www.nora-as.cz