

**Komplexní
přístup-optimální
varianta**

Ruční i automatický reprocessing endoskopů



04/2013

Manuálně

1, aseptická příprava dutiny ústní a orofaryngu:



octenidol 15ml/1min.
povalovat v ústech/kloktat
a pak vyplivnout

2, utření endoskopu
po vytažení od vnějších
nečistot:



Mikrocid AF ubrousky - alkoholy
nebo **Mikrocid sensitive ubrousky**:
bezalkoholové
nebo roztoky : expozice 1 min.

3, první stupeň dezinfekce/dekontaminace a čištění v jednom:

Gigasept AF forte 2l/ 5l- aminy
pracovní roztok 0,75%/10 min. (A,(B),V)
použitelný pro celou směnu



4, oplach pitnou vodou a usušení endoskopu

5, druhý stupeň/vyšší stupeň dezinfekce : Gigasept PAA 5l hotový roztok

kys.peroctové: expozice 5 min.
Spektrum ABCTMV, použitelný
týden nebo pro 50 endoskopů
(kontrola účinnosti: indikační stripky)



6, oplach čistou/sterilní vodou a osušení

Čištění a dezinfekce v automatech Olympus, BHT, Storz, ...atd.: Testováno dle EN ISO 15583-4 a 15883-5

Thermosept ER: enzymatický čistič:
0,5% pracovní roztok



Thermosept ED: aldehydová dezinfekce:
1% pracovní roztok/ 54°C(ABCTMC)