

Schuelke systém napuštěných ubrousků

dezinfekce a čištění
ploch a povrchů

Vhodné produkty/pracovní roztoky: Antifect extra/0,5%, SM dezinfekční čistič/1% nebo 3%
Mikrozid AF liq/koncentrát, Mikrozid sensitive liq/koncentrát, Terralin protect/0,5%

Step 1

Připravte si pracovní plochu vydezinfikováním např. přípravkem Terralin protect nebo Mikrozid AF a navlečte si rukavice.



Step 2

Sundejte víko z kyblíku a vložte do něj rozbalenou rolu textilních ubrousků. Ze středu povytáhněte jeden ubrousek.



Step 3

Připraveným pracovním roztokem (nebo hotovým) : 2 - 2,5l postupně zalejte rolu ubrousků spirálovitě od středu k obvodu. Tím zajistíte dokonalé promočení.



Step 4

Pak vemte za povytažený ubrousek a protáhněte ho prořezaným otvorem ve víku tak, aby povytažený konec bylo možné lehce vytáhnout.



Step 5

Kyblík uzavřete víkem a vrchní uzávěr tlakem uzavřete až zaklapne.



Step 6

Počkejte minimálně 20 minut. Tento čas je potřebný na úplné promočení obsahu.



Wait
20 minutes



objem 5,7 l

Step 7

Mezitím si můžete připravit štítek, který nalepíte na připravené místo na kyblíku.



Step 8

Teď je systém připraven k použití.

**role: 100 ubrousků
30 x 30 cm**



vylijte zbylou tekutinu



vyberte zbylé ubrousky



umyjte a vydezinfikujte kyblík i víko



Výměna náplní po uplynutí doby použitelnosti Refilling

Připravený a napuštěný kyblík je použitelný 28 dní.

Autorizovaný distributor pro ČR:

Nora, a.s. Jankovcova 2(Tokovo), Praha 7, tel: +420 266 78 29 29, www.nora-as.cz