

# Mikrozid AF Jumbo Tücher



**Bezaldehydový**

napuštěné dezinfekční ubrousky,

**200 kusů v balení i náplni,  
velké ( rozměr 20 x 27 cm),**

široké spektrum mikrobiologického  
účinku v krátkém čase,  
rychlé osychání bez šmouh

## Charakteristika

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem-  
k okamžitému použití.

## Použití

rychlá alkoholová dezinfekce- zdravotnický prostředek  
[ CE 0297 ] ,všechny oblasti se zvýšeným rizikem infekce:

- Místa kontaktu s pacientem
- Vyšetřovací plochy
- Operační stoly a ohraničené pracovní plochy
- Povrchy zdravotnických prostředků

## Mikrobiologická účinnost

Bakterie (vč.Tb), mikroskopické houby, viry HBV, HIV, HCV,  
Adeno-viry, Rota-viry,, Papova-viry, Polio - viry


## Produktová data

### Složení

Jedna dóza nebo náhradní náplň obsahuje 200 ks ubrousků  
a 680 g účinné látky  
1 g účinné látky obsahuje: 0,25 g Ethanolu (94 %-ního),  
0,35 g 1-Propanolu

### Chemicko-fyzikální data:

vzhled účinné substance:	čirý bezbarvý roztok
Hustota (20°C)	ca. 0,895
Viskozita	< 15 Sek.
Teplotně stabilní	od - 5°C do + 40 °C
pH-hodnota:	ca. 6,0

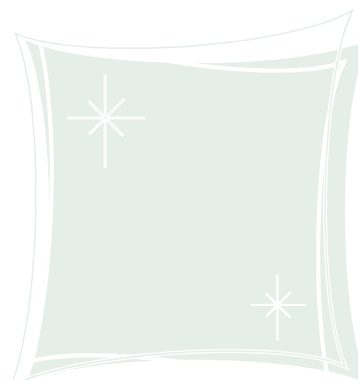

## Expediční balení

200-Jumbo-T cher-dóza.....	10 Dosen	109157
200-Jumbo-T cher-náhr.sáček	12 sáčků..	109159

## Účinnost

Spektrum	Expozice
Bakterie, houby (dle DGHM-směrnice se zkrácenou expozicí)	1 min.
MRSA Multirezistentní stafylokokové kmeny	1 min.
Tb	1 min.
plně virucidní	30 min.
omezeně virucidní (vč. HBV, HIV a HCV)	30 sek
Adenoviry	2 min.
BVDV	30 sek.
PAPOVA SV 40	15 min.
Polioviry	30 min.
Rotaviry	30 sek
Vacciniaviry	30 sek
<b>DGHM-Liste / Zertifikat-německá státní hygiena</b> dezinfekce ploch a povrchů v nemocnici a praxi	5 min.
ÖGHMP Expertise Nr. 95/8- <b>expertiza rakouská</b>	1 min.

\* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

## Návod k použití

Vrchní uzávěr odšroubujte a první ubrousek prostrčte perforovaným průřezem. Vraťte na místo. Ubrousky tahem odebírejte. Po použití víko uzavřete, aby se zabránilo vysušení obsahu.  
Plochu/povrch dobře vytřete a nechte působit 1-2 min.

## Značení dle EU směrnice

**R10:** vznětlivé

## Bezpečnostní pokyny

Zabraňte zanešení do očí. Chraňte před dosahem dětí.  
Plochy citlivé na alkohol (jako např. akrylové sklo) tímto přípravkem neošetřovat



EMAS  
CERTIFIKATES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG.-NR. D-150-00003



Sch Ike & Mayr GmbH ist zertifiziert gem § DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 (**Reg.-Nr.004567 MP21**) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem § ko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. DE-S-150 00003).

Sch Ike & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt  
Telefon 040 / 521 00-0  
Telefax 040 / 521 00-318  
www.schuelke-mayr.com  
mail@schuelke-mayr.com

Distribuce pro ČR: **Nora**, a.s.  
Malostranské nám.2  
110 00 Praha 1  
tel: ++420 266 782 929  
fax: ++ 420 266 782 992  
www.nora-as.cz

Sch Ike & Mayr Ges.m.b.H  
Zieglergasse 8  
A-1070 Wien  
Telefon (1) 523 25 01  
Telefax (1) 523 90 35 79  
office@schuelke-mayr.at