

Thermosept[®]RKF forte

**Nová formulace -
silná čistící schopnost**



nepěňivý, vhodný pro Oxi Vario

vylepšené čistící schopnosti
zvýšenou alkalicitou

dobrá emulgace

efektivnější ochrana proti korozi

Expediční balení

	Kód
5-kg-Kanistr. 1. x 5 kg.	148321
10-kg-Kanistr. 1 x 10 kg.	148322
30-kg-Kanistr. 1 x 30 kg.	148323
200-kg-sud. 1 x 200 kg.	148324

Přípravek typu

Thermosept RKF forte je alkalický čistící prostředek (koncentrát) – bez tenzidů, určený k čištění zdravotn. prostředků - nástrojů chirurgických, anestetického příslušenství a.i.

Doporučení k použití

ThermoseptRKF forte je především určen k reprocesingu chirurgických a mikrochirurgických nástrojů, MIC-nástrojů, rigidních endoskopů, anestetického příslušenství, operační obuvi, dětských mléčných láhví, podložných mís a nerezových kontejnerů [CE].

ThermoseptRKF forte lze použít jednak do taktovacích automatů a také do jednocyklových mycích automatů.

Produktová data

Označování dle VO (EG) Nr. 648/2004
< 5 % Phosphonate, 5 – 15 % Phosphate
Další látky: Silikate

Chemicko-fyzikální údaje:

Koncentrát:	
Vzhled:	čirá, lehce nažloutlá kapalina
PH-hodnota:	14
hustota (20 °	1,29 g/cm ³
0,5 %-ní pracovní roztok:	
PH-hodnota:	ca 12,3

Pracovní roztoky

ThermoseptRKF forte se dávkuje následovně:
Standardní koncentrace 0,5 % (5 ml/l).
Podle znečištění lze modifikovat: 0,3 – 1 % (3 – 10 ml/l).
Dávkování probíhá automaticky, dávkovacími pumpami.

Příslušenství

	Art. Nr.
Klíč ke kanystru 5 + 10 kg.	135801
Klíč ke kanystru 30 kg	135901

Návod k použití

Nejefektivnější výsledek procesu je dosažen kombinací neutralizačním prostředkem (např. Thermosept NKP, Thermosept NKZ), aby byly dokonale odstraněné alkalické zbytkové komponenty.

Standardní nastavení cyklu:

- předmytí 3 minuty
- mytí 55°C 3-10 minut
- neutralizace
- mezioplach
- termická dezinfekce dle Ao schémy

Termická dezinfekce vyžaduje samozřejmě použití demineralizované vody.

Mytí a následné programové kroky si vyžadují minimálně změkčenou vodu.

Thermosept RKF forte je určen také pro chemotermickou dezinfekci, t.j. ke kombinaci s Thermosept DK a také je možné oba přípravky smíchat, pokud mytí i dezinfekce je prováděna v jedné fázi.



Schuelke&Mayr GmbH
22840 Norederstedt, SRN
tel:+49-40-521 00-0
fax:+49-40-521 00-318
www.schuelke-mayr.com

Značení dle EU směrnice

Platí pro koncentrát:

C: žíravý, obsahuje hydroxid draselný

R35: způsobuje těžké popáleniny

S26: při zanesení do očí ihned vypláchněte velkým množstvím vody a konzultujte lékaře

S281: po potřísnění pokožky ihned omyjte velkým množstvím vody

S36/37/39: při práci používejte osobní ochranné pomůcky jako jsou ochranné brýle/štíť, rukavice a ochr.oděv

S45: v případě nehody ihned konzultujte lékaře a ukažte etiketu



Životní prostředí:

Schuelke-Mayr produkuje ve validovaném ekologickém managementu (Reg.Nr. DE-S-150 00003)

Obaly:

Nádoby i uzávěry jsou polyetylenu (HDPE) a jsou tak i označené. Prázdné obaly jsou plně recyklovatelné. Etikety jsou z PE. Žádný z obalů neobsahuje PVC.

Zvláštní upozornění

Titanové nástroje a nástroje z titanových slitin je potřeba nejdříve odzkoušet kvůli barevné stálosti.

Koncentrát ani pracovní roztoky nemíchat s kyseliny.

Není určeno na výrobky z hliníku.