

Dezinfekční řád stomatologie

schülke 

Odpovídá znění vyhlášky č.195/2005 Sb.a evropským standardům

oblast použití	četnost / kdy	způsob	dez.prostředek	spektrum
 hygienická dezinfekce rukou	před a po vyšetření každého pacienta, při jakékoliv kontaminaci, po použití WC před a po vyšetření,	ruce umýt mýdlem s dezinfekční přísadou a vysušit nanést cca 3 ml koncentrovaného dezinfekčního přípravku, vtírat 30 sekund a nechat zaschnout	DESDERMAN N sol.konc. SENSIVA sol. koncent.	A,B,T,M,V,MRSA (etanol+bifenyol) A,B,M,V,MRSA (propanoly)
 mytí rukou	po kontaminaci, před hygienickou a chirurgickou dezinfekcí	nanést cca 2ml koncentrátu, napěnit malým množstvím vody, opláchnout a osušit jednorázovým ubrouskem	ESEMTAN Waschlotion SM Waschlotion	A A
 regenerace a ochrana rukou	ochrana před prací s vodou regenerace po práci několikrát denně	nanést malou vrstvu prostředku, rozetřít a nechat vsáknout do pokožky	ESEMTAN Skin Balsam/Hand Balsam	
 chirurgická dezinfekce rukou	před chirurgickými zákroky	ruce umýt mýdlem s dezinfekční přísadou, vysušit a dvakrát po sobě vtírat cca 5 ml koncentrovaného roztoku po dobu 3 minut, nebo do zaschnutí	DESDERMAN N sol./konc. SENSIVA sol.koncentr.	A,B,T,M,V,MRSA (etanol+bifenyol) A,B,M,V (propanoly)
 röntgenové filmy	po vybrání z úst	otřít navlhko	MIKROZID sensitive ubr. expoz.5 min.	A,B,M,V (aminy)
hygienu a deodorizaci ústní dutiny aseptická dezinfekce dutiny ústní výplach koř.kanálek výplach kapes, extrakčních ran apod.	před, během a po zákroku před a po chirurgických zákrocích 3 x ihned po sobě dle potřeby	nechat povalovat v ústech 30 sekund a vyplivnout proplachovat ústa cca 20 ml roztoku po dobu 20 sekund a pak vyplivnout(oplachování -zředěno 1:1/ 30sek) kanylou	OCTENIDOL roztok OCTENISEPT sol./ 1 min. OCTENISEPT sol./ 1 min.	A,V,(B) (octenidin) A,B,T,M,V,MRSA A,B,T,M,V,MRSA (octenidin + voda)
 nástroje mytí a dezinfekce a rotační nástroje (vrtáčky, brusky...)	po každém použití	vložit použitý nástroj do dezinfekčního roztoku po vytažení opláchnout tekoucí pitnou vodou a dát sterilizovat (u plastových a rotačních nástrojů nepřekračovat expoziční dobu a rotační nástroje ihned osušit) (při použití Grotanadu BB se již nástroje neoplachují vodou)	Gigasept instru AF 1,5%/60min.3%/15min. v ultrazv.lázni 3%/ 5 min. možnost použití až 7 dní GROTANAT Bohrerbad konc./30 min, ultrazv/15min. GIGASEPT FF/dezinfekce 6%/15 min, spóry 10%/ 5h možnost použití až 16 dní	A,B,T,M,V, MRSA (bezaldehydový) A,B,(T),M,V,MRSA (louh) A,B,T,M,V,C (aldehdydový)
 pomůcky na více použití a tupé nástroje odsávací systém s amalgamovými odlučovači nebo bez	po každém použití v době polední pauzy a po ukončení ordinace	mokrý metoda - nechat zaschnout nasát do systému a nalít do pívátka po expozici vysát ze systému a propláchnout vodou Aspirmatic cleaner jednou týdně místo Aspirmaticu	MIKROZID AF liquid koncentrát/ 2 min ASPIRMATIC 2%/ 30 min. ASPIRMATIC cleaner 5% / 1 - 2 h	A,B,M,V MRSA (alkoholy) A,B,M,V,MRSA
 zubní protézy a dentální otiskovací hmoty	po vytažení z úst pacienta, před nasazením z laboratoře	vložit do roztoku, po vytažení opláchnout vodou	PERFORM 2% - 10 Min.	A,B,T,M,V,C MRSA (aktivní kyslík)
 plochy a povrchy vyšetřovací křeslo	po každém použití	postříkem nebo setřením namokro	MIKROZID AF liquid koncentrát/ 1 min. MICROZID ubrousky	A,B,M,V MRSA (alkoholy) A,B,(T),M,V,MRSA
 plochy a povrchy nábytek, podlahy, čekárny, sociální zařízení,nádoby na odpad	1 x denně nebo dle potřeby	metoda vlhkého úklidu	TERRALIN protect 0,50%/60 min. PERFORM 0,5%/60min	A,B,M,V, MRSA (KAS+alkohol) A,B,(T),M,V, MRSA
 malé plochy vozíky, telefony, lampičky, kliky, obuv apod.	3 x denně nebo vždy po kontaminaci	metoda vlhkého úklidu setřít, nebo postříkat a nechat zaschnout	MIKROZID sensitive ubr. MIKROZID ubrousky MIKROZID AF sprej	A,B,M,MRSA A,B,M,V,MRSA A,B,M,V,MRSA
 plochy a povrchy obložení stěn, zrcadla, dveře, okenní parapety	1 x týdně velký úklid a při epidemiologicky závažných situacích	metoda vlhkého úklidu a mechanického čištění	TERRALIN protect 1%/ 30 min. PERFORM 1%/30 min nebo 2%/10 min.	A,B,M,V, MRSA A,B,(T),M,V,C MRSA

Pro úklid a dezinfekci používat vlažnou vodu o teplotě 20 - 25°C

Vysvětlivky: A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, B - usmrcení virů

C - inaktivace bakteriálních spór

V - fungic. účinek

T-usmrcení mykobakterií Tuberculosis, M - usmrcení patogenních mykobakterií

MRSA- masivresistentní Staphylococcus aureus

Nora a.s., Malostranské nám.2, Praha 1 provozovna: Jankovcova 2, 170 00 Praha 7 tel/fax: 266 78 29 29 info: 608 666 885	Zdravotnické zařízení/ordinace
---	--------------------------------